


Guia de Configuração Rápida

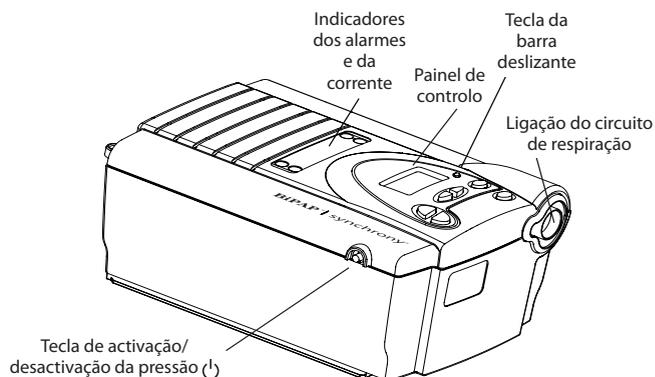


Este guia fornece-lhe instruções básicas sobre como navegar nos ecrãs de parâmetros medidos, bem como nos ecrãs do modo de fornecedor usados para modificar as definições do dispositivo. Deve consultar o *Manual do Fornecedor do BiPAP Synchrony* para obter mais informações.

NAVEGAÇÃO NOS PARÂMETROS MEDIDOS

Para navegar nestes ecrãs do visor:

- Prima o botão deslizante pequeno  para avançar para o ecrã seguinte.
- Prima o botão  para voltar ao ecrã de monitorização.

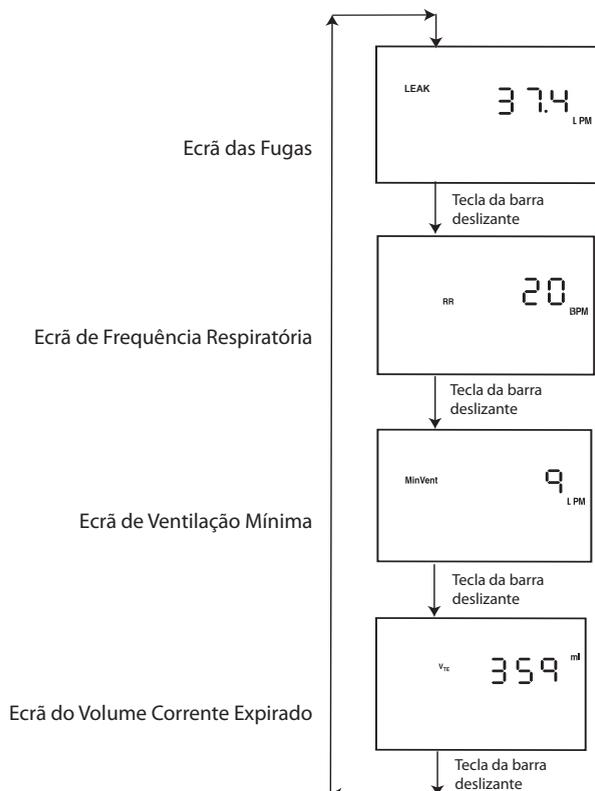

ACESSO AOS ECRÃS DO MODO DE FORNECEDOR

O acesso ao modo de fornecedor activa definições que não podem ser modificadas pelo utilizador. Para aceder ao modo de fornecedor:

1. Ligue o cabo de CA à fonte de alimentação e a uma tomada eléctrica, e, em seguida, ligue o cabo no outro lado da fonte de alimentação ao dispositivo.
2. Prima e mantenha premidos:
 - o botão direito do utilizador 
 - o botão .

Quando o símbolo de desbloqueio  aparece, o dispositivo encontra-se no modo de fornecedor e pode libertar os botões. Será exibido o ecrã de configuração do modo (exibido na página seguinte).

Nota: Os utilizadores terão acesso a todos os ecrãs de parâmetros medidos, exibidos à esquerda.

NAVEGAÇÃO NO ECRÃ DO MODO DE FORNECEDOR


Para navegar nestes ecrãs do visor:

- Use os botões direito e esquerdo  para navegar para o ecrã anterior e seguinte.
- Use os botões  e  para ajustar as configurações em cada ecrã.
- Use o botão  para voltar ao ecrã de monitorização.

Nota: Os modos disponíveis incluem os modos S, S/T, PC, T e CPAP.

Nota: Em todos os ecrãs do modo de fornecedor, o símbolo de desbloqueio  indica que se encontra neste modo.

Ecrã das definições do modo

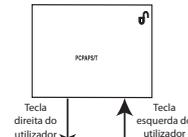

Ecrã de definição da CPAP

Só surge no visor se o modo configurado for o CPAP.




Ecrã de definição de AVAPS

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP.



Ecrã de definição de volume

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP e a função AVAPS estiver activada.

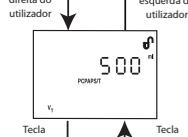


Ecrã de definição da IPAP Máx.

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP e a função AVAPS estiver activada.



Ecrã de definição da IPAP Mín.

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP e a função AVAPS estiver activada.

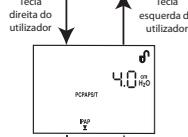


Ecrã de definição da IPAP

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP e a função AVAPS estiver desactivada.




Ecrã de definição da EPAP

Só surge no visor se o modo configurado NÃO for o CPAP.

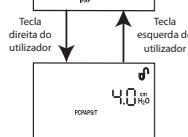

Ecrã de definição da frequência respiratória

Só surge no visor se o modo configurado for o S/T, PC ou T.

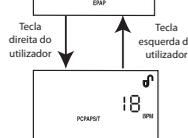

Ecrã de definição do tempo inspiratório

Só surge no visor se o modo configurado for o S/T, PC ou T.



Ecrã da definição da função Flex

Só surge no visor se o modo configurado for S com IPAP ≤ 25 cm de H₂O e se o modo AVAPS estiver activado.

